

Materac lateksowo piankowy VERA+

REF MDM.2308-6 |

Wyrób medyczny

WAŻNE – PRZECZYTAĆ UWAGNIE - ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ

Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu, należy uważnie zapoznać się z treścią instrukcji używania. Wyrób użytkować zgodnie z informacjami podanymi w instrukcji. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania lub uzyskania dodatkowych informacji należy skonsultować się z lekarzem lub fizjoterapeutą.

CECHY WYROBU

- Trwały, dwustronny materac wyposażony w oddychający i szybko wysychający pokrowiec, z zintegrowaną warstwą hydrofobową chroniącą materac przed zamoczeniem niewielką ilością płynów.
- Materac przeznaczony jest dla dzieci w wieku szkolnym (powyżej 6 roku życia) i dla osób dorosłych.
- Wyrób posiada rdzeń z pianki poliuretanowej z kanałami wentylacyjnymi.

OPIS WYROBU

Materac lateksowo piankowy VERA+ (Nr kat.: MDM.2308-6) to dwustronny materac składający się z:

1. Oddychającego pokrowca z kolekcji bamboo covers, wykonanego z trzech warstw: wysokiej jakości dzianiny bambusowej z poliestrem wykończonyj protektorem hydrofobowym, puszystej włókniny poliestrowej i płaskiej włókniny polipropylenowej.
2. Warstwy komfortu z pianki lateksowej.
3. Rdzenia z pianki poliuretanowej.

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

W normalnych warunkach użytkowania materac przeznaczony jest do wielokrotnego stosowania:

- w rehabilitacji, profilaktyce lub łagodzeniu przebiegu chorób układu kostnowęzłowego, mięśniowego i tkanki łącznej,
- wspomagająco w rehabilitacji lub łagodzeniu przebiegu stanów pourazowych i pooperacyjnych narządu ruchu,
- wspomagająco w rehabilitacji lub łagodzeniu dolegliwości w przebiegu niedowładów spastycznych i wiotkich oraz nerwoból lub w przypadku innych chorób neurologicznych, a także wad postawy,
- wspomagająco w przeciwdziałaniu zaburzeniom snu.

WŁAŚCIWOŚCI POKROWCA

Wielowarstwowa konstrukcja pokrowca bamboo covers zapewnia swobodną cyrkulację powietrza i poprawia komfort snu. Chroni wkład materaca przed zabrudzeniami, zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami. Pokrowiec zewnętrzny jest odporny na plamy i łatwy do utrzymania w czystości. Pokrowiec został wyposażony w bezpieczny zamek, który uniemożliwia niekontrolowane otwarcie pokrowca i dostanie się do warstw wypełnienia (warstwy komfortu, jeśli jest stosowana i/lub rdzenia), minimalizując ryzyko uwięznięcia, zadławienia czy uduszenia.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Rozmiar materaca należy odpowiednio dopasować do wieku, wzrostu i wagi użytkownika oraz do rozmiaru łóżka/ramy łóżka. Materac stosować na odpowiednio dobranym stelażu z otworami, aby zapewnić jego odpowiednią wentylację. Wyrób jest nieinwazyjnym wyrobem medycznym, przeznaczonym do wielokrotnego użytkowania przez jednego użytkownika. Materac użytkować zawsze zabezpieczony bawełnianym prześcieradłem i ochraniaczem na materac - nakładką lub podkładem. Wyrób stosować zgodnie z przewidzianym zastosowaniem oraz z informacjami podanymi w niniejszej instrukcji i na etykiecie/etykietach wyrobu.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Przed pierwszym zastosowaniem materaca, po każdej zmianie użytkownika, a także w każdym innym przypadku, należy obowiązkowo przeprowadzić procedurę prania pokrowca zewnętrznego zgodnie z parametrami procesu konserwacji podanymi poniżej i na etykiecie/etykietach wyrobu.
- Materac dwustronny należy okresowo przewracać, co najmniej raz na trzy miesiące, aby wydłużyć jego użyteczność oraz zapewnić prawidłowe działanie.
- Materac przeznaczony jest do stosowania przez jedną osobę w warunkach domowych. W razie zaistnienia konieczności użycia przez inne osoby, przed

ponownym użyciem należy obowiązkowo poddać procesowi prania pokrowiec materaca, a także stosowane prześcieradło oraz ochraniacz na materac zgodnie z zaleceniami podanymi na ich etykietach.

- W celu zabezpieczenia wyrobu przed zabrudzeniem, zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem należy zawsze stosować dodatkowy ochraniacz na materac – nakładkę lub podkład. W przypadku zamoczenia lub zabrudzenia pokrowca należy niezwłocznie przeprowadzić standardową procedurę prania.
- Nie używać materaca zawilgoconego i/lub przemoczonego. Należy stosować jednorazowe nieprzemakalne podkłady, w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem lub przemoczeniem wyrobu.
- Nie dopuszczać do deformacji wyrobu poprzez jego zginanie, łamanie, rolowanie lub jakiegokolwiek inne działanie, które może doprowadzić do zmiany kształtu wyrobu.
- Nie przenosić materaca wraz z użytkownikiem.
- Nie używać materaca bezpośrednio na podłodze lub innym miejscu do tego celu nieprzeznaczonym.
- Pod wpływem użytkowania lub przeprowadzonych procesów konserwacji pokrowca możliwe jest pogorszenie jego wytrzymałości lub właściwości wizualno-estetycznych czy hydrofobowych, a także istnieje możliwość zniekształcenia warstw wypełnienia (warstwy komfortu, jeśli jest stosowana i/lub rdzenia) materaca, co wpływa na obniżenie właściwości wyrobu. W przypadku uszkodzenia, widocznych oznak zużycia lub deformacji pokrowca czy warstw wypełnienia materaca, należy wymienić wyrób lub jego uszkodzony element na nowy.
- Wyrób przeznaczony jest do nieprzerwanego stosowania, nie dłużej niż 10 godzin, w przypadku osoby, która może samodzielnie zmieniać swoją pozycję ciała oraz nie pozostaje w pozycji leżącej lub siedzącej przez cały czas. Natomiast w przypadku osoby przebywającej w takich pozycjach krótko- lub długotrwale oraz niezdolnej do samodzielnego dokonywania zmiany pozycji swojego ciała na materacu, należy jej pomóc zmieniać pozycję, średnio, co 2-3 godziny.
- W przypadku, gdy wyrób zostanie narażony na znaczne zmiany wilgotności i temperatury, wynikające, np. z przenoszenia lub transportu wyrobu, przed użyciem należy odczekać tak długo, aż temperatura oraz wilgotność wyrobu ustabilizuje się, i wyrówna się z temperaturą pokojową.
- Wymiary wyrobu są podane na etykiecie/etykietach. Producent zastrzega sobie prawo do tolerancji wymiarowej w zakresie ± 30 mm (długość, szerokość, grubość).
- Gwarantowany okres użytkowania wyrobu, bez utraty pierwotnych właściwości wynosi 2 lata, przy założeniu przeprowadzenia maksymalnie 30 cykli prania pokrowca zewnętrznego zgodnie z zaleceniami.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych związanych z użytkowaniem wyrobu lub w przypadku wątpliwości dotyczących odpowiedniego doboru materaca, należy skonsultować się z lekarzem lub fizjoterapeutą.
- Trzymać z daleka od ognia oraz innych źródeł ciepła (kaloryferów, grzejników, piecyków ciepłych).
- Opakowanie jednostkowe zapewnia szczelne i próżniowe zapakowanie wyrobu. Dlatego przed pierwszym użytkowaniem należy wyprać pokrowiec oraz wywietrzyć wkład materaca i odczekać, co najmniej 24 godziny przed użyciem wyrobu. Umożliwi to pozbycie się naturalnych zapachów poszczególnych komponentów wyrobu.
- Wszystkie materiały opakowaniowe (np. folia, pudełka, plakaty, plastikowe końcówki) powinny być przed użyciem usunięte, aby nie pozostawały w zasięgu dzieci, gdyż mogłyby stać się niebezpieczną zabawką.

PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA

- Nie stosować u osób, u których występuje nadwrażliwość na jakikolwiek składnik.
- Nie stosować w przypadku wystąpienia podrażnień, zmian skórnych lub innych objawów alergicznych, a także u osób mających uszkodzoną skórę, otwarte, niezabezpieczone opatrunkiem rany lub owrzodzenia.
- Nie stosować wyrobu niezabezpieczonego bawełnianym prześcieradłem oraz ochraniaczem na materac – nakładką lub podkładem. Nie stosować w bezpośrednim kontakcie z ciałem użytkownika.
- Nie stosować wyrobu, w przypadku osób, dla których ten rodzaj profilaktyki, rehabilitacji lub wspomaganie leczenia jest niewystarczający lub nieodpowiedni.

OSTRZEŻENIA

- Nie używać więcej niż jednego materaca w łóżku.
- Ze względów bezpieczeństwa ważne jest, aby nie było przerw między materacem, a bokami/szczytami łóżka. Materac przeznaczony jest do stosowania w łóżku, o wymiarze wewnętrznym nie większym niż 30 mm, od rozmiaru materaca (dł. x szer.).
- Dla bezpieczeństwa dziecka, w celu uniknięcia ryzyka, związanego z dostaniem się do wnętrza wyrobu i połknięcia jego warstw wypełnienia, suwak zamka błyskawicznego nie posiada uchwyty ułatwiającego otwarcie pokrowca. Dlatego, aby zdjąć pokrowiec w otwór suwaka należy włożyć agrafkę, spinacz lub inny przedmiot o podobnym kształcie i mocno pociągnąć, aby otworzyć lub zamknąć pokrowiec. Każdorazowo należy upewnić się czy przedmiot użyty do otwarcia suwaka nie został w pokrowcu lub nie znajduje się w pobliżu materaca.
- Nie pozostawiać dziecka na materacu niezabezpieczonym pokrowcem (np. w przypadku jego prania, wymiany, itp.), aby uniemożliwić dziecku bezpośredni kontakt z warstwą wypełnienia (warstwą komfortu i/lub rdzenia).
- Nie kłaść materaca obok kominka, i/lub innych urządzeń osiągających wysoką temperaturę, np. kominki/piecyki ciepłe, gazowe, kaloryfery, grzejniki, itp., a także w pobliżu otwartego źródła ognia aby uniknąć ryzyka pożaru.
- Nie używać materaca, jeśli jakkolwiek jego część jest uszkodzona, zepsuta, rozdarta lub jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu. Stosować wyłącznie elementy zamienne/wymienne zatwierdzone przez producenta.

KONSERWACJA

- Pokrowiec należy poddawać okresowej procedurze prania (co najmniej jedno pranie, co 8 tygodni) lub w miarę potrzeby częściej, przy założeniu, że materac będzie stosowany zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji.

- Pokrowiec prać w pralce w temperaturze 40°C (proces normalny, wirowanie max. 1000 obr./min) oraz suszyć w stanie rozłożonym na płasko, z daleka od działania promieni słonecznych i źródeł ciepła.
- Pokrowiec prać i prasować na prawej stronie. Nie prać z wyrobami innego typu. Suszyć bez użycia źródła ciepła (np. kaloryfera, grzejnika lub suszarki do włosów). Nie suszyć w suszarce automatycznej. Przed suszeniem pokrowiec należy zawsze poddać delikatnemu rozciąganiu, aby ułatwić jego ponowne założenie na materac. W tym celu należy starannie rozciągnąć lekko wilgotny pokrowiec ze wszystkich stron (za wszystkie 4 rogi), w taki sposób, aby przed wyschnięciem powrócił do swoich pierwotnych rozmiarów.
- Prać w pralce o ładowności od 7 kg.

Parametry procesu konserwacji pokrowca zewnętrznego:



UWAGA: Nie prać warstwy komfortu, jeśli jest stosowana i/lub rdzenia materaca. Proces prania może spowodować utratę właściwości wyrobu.

UWAGA: Nie prasować lewej (wewnętrznej) strony pokrowca.

SKŁAD

Pokrowiec: 33% przędza bambusowa; 67% poliester; Powłoka hydrofobowa: Ruco®-Dry Eco Plus / 100% poliester / 100% polipropylen.

Warstwa komfortu: 20% lateks naturalny, 80% lateks syntetyczny.

Rdzeń: 100% poliuretan.

PRZECHOWYWANIE

- Materac transportować w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczającym przed zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym i zamoczeniem.
- Wyrób przechowywać i użytkować w temperaturze od 15°C do 35°C, w suchym, pozbawionym wilgoci i nadmiernego kurzu pomieszczeniu, z daleka od działania promieni słonecznych oraz z daleka od ognia oraz innych źródeł ciepła.

WAŻNE

W razie wystąpienia każdego poważnego incydentu związanego z wyrobem, należy niezwłocznie poinformować producenta o tym zdarzeniu pisemnie na adres: Materacyk Baer Jacek, Czarnecki Damian Spółka Jawna, ul. Grunwaldzka 14, 62-020 Swarzędz, Polska; elektronicznie na adres e-mail: biuro@materacyk.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 501 218 009 oraz właściwy organ państwa członkowskiego, na którego terytorium miał miejsce incydent.

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

Wyjaśnienie symboli stosowanych na etykiecie/etykietach wyrobu:

	Oznakowanie CE (potwierdzenie zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745)		Producent		Wyrób medyczny		Zajrzyj do instrukcji używania
	Numer katalogowy		Trzymać z dala od światła słonecznego		Chronić przed wilgocią		Numer serii
	Zawartość lub obecność naturalnej gumy lateksowej						

Wyjaśnienie symboli oznaczających proces konserwacji pokrowca zewnętrznego:

	Maksymalna temperatura prania 40°C, proces normalny		Nie stosować bielenia		Nie suszyć w suszarce bębnowej
	Nie czyścić chemicznie		Prasowanie w maksymalnej temperaturze dolnej płyty 110°C. Prasowanie z zastosowaniem pary może powodować nieodwracalne uszkodzenia.		



Materacyk Baer Jacek, Czarnecki Damian Spółka Jawna
ul. Grunwaldzka 14, 62-020 Swarzędz, Polska
tel.: + 48 61 652 68 29 | biuro@materacyk.pl
www.materacyk.pl



MDM.2308-6/REV.0/02.2024