

# Nakładka Bamboo

REF MDN.2301-0 |

## Wyrób medyczny

### WAŻNE – PRZECZYTAĆ UWAŻNIE - ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ

Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu, należy uważnie zapoznać się z treścią instrukcji używania. Wyrób użytkować zgodnie z informacjami podanymi w instrukcji. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania lub uzyskania dodatkowych informacji należy skonsultować się z lekarzem lub fizjoterapeutą.

### CECHY WYROBU

- Trwała, oddychająca i szybko wysychająca nakładka, odporna na plamy i łatwa do utrzymania w czystości.
- Wielowarstwowa konstrukcja nakładki zapewnia swobodną cyrkulację powietrza i poprawia komfort snu.
- Nakładka chroni wkład materaca przed zabrudzeniami, zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami, a dzięki zintegrowanej warstwie hydrofobowej dodatkowo chroni materac przed zamoczeniem niewielką ilością płynów.
- Nakładka odpowiednia dla dzieci od urodzenia do 3 roku życia.
- Nakładka spełnia wymagania normy PN-EN 16890:2017+A1:2021.

### OPIS WYROBU

Nakładka Bamboo (Nr kat.: MDN.2301-0) to oddychający ochraniacz na materac wykonany z trzech warstw: wysokiej jakości dzianiny bambusowej z poliestrem, wykończonej protektorem hydrofobowym, puszystej włókniny poliestrowej i płaskiej włókniny polipropylenowej. Mocowanie za pomocą gumek zapewnia dokładne dopasowanie do materaca oraz jego całkowitą ochronę poprzez uniemożliwienie przemieszczania się nakładki na materacu.

### PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

W normalnych warunkach użytkowania wyrób przeznaczony jest do stosowania na całą powierzchnię materaca, w celu jego ochrony przed zabrudzeniem, zanieczyszczeniem oraz uszkodzeniem, a także przed zamoczeniem niewielką ilością płynów.

### SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Rozmiar nakładki należy odpowiednio dopasować do rozmiaru materaca. Nakładkę stosować na materacu ułożonym na odpowiednio dobranym stelażu z otworami, aby zapewnić jego odpowiednią wentylację. Wyrób jest nieinwazyjnym wyrobem medycznym, przeznaczonym do wielokrotnego użytkowania przez jednego użytkownika. Nakładkę użytkować zawsze zabezpieczoną bawełnianym prześcieradłem. W razie konieczności, stosować dodatkowy jednorazowy lub wielorazowy nieprzemakalny podkład na materac, w celu zabezpieczenia materaca przed całkowitym przemoczeniem. Wyrób stosować zgodnie z przewidzianym zastosowaniem oraz z informacjami podanymi w niniejszej instrukcji i na etykiecie/etykietach wyrobu.

### WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Przed pierwszym zastosowaniem, po każdej zmianie użytkownika, a także w każdym innym przypadku, należy obowiązkowo przeprowadzić procedurę prania nakładki zgodnie z parametrami procesu konserwacji podanymi poniżej i na etykiecie/etykietach wyrobu.
- Nakładka przeznaczona jest do stosowania przez jedną osobę w warunkach domowych. W razie zaistnienia konieczności użycia przez inne osoby, przed ponownym użyciem należy obowiązkowo poddać procesowi prania nakładkę, a także stosowane prześcieradło

oraz dodatkowy podkład (jeśli jest stosowany), zgodnie z zaleceniami podanymi na ich etykietach.

- Nie używać nakładki bezpośrednio na podłodze lub innym miejscu do tego celu nieprzeznaczonym.
- Nie używać wyrobu zawilgoconego i/lub przemoczonego.
- Pod wpływem użytkowania lub przeprowadzonych procesów konserwacji nakładki możliwe jest pogorszenie jej wytrzymałości lub właściwości wizualno-estetycznych czy hydrofobowych, co wpływa na obniżenie właściwości wyrobu. W przypadku uszkodzenia, widocznych oznak zużycia lub deformacji, należy wymienić wyrób na nowy.
- Wymiary wyrobu są podane na etykiecie/etykietach. Producent zastrzega sobie prawo do tolerancji wymiarowej w zakresie  $\pm 30$  mm (długość, szerokość, grubość).
- Gwarantowany okres użytkowania wyrobu, bez utraty pierwotnych właściwości wynosi 2 lata, przy założeniu przeprowadzenia maksymalnie 30 cykli prania pokrowca zewnętrznego zgodnie z zaleceniami.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych związanych z użytkowaniem wyrobu należy skonsultować się z lekarzem.
- Trzymać z daleka od ognia oraz innych źródeł ciepła (kaloryferów, grzejników, piecyków ciepłych).
- Opakowanie jednostkowe zapewnia szczelne i próżniowe zapakowanie wyrobu. Dlatego przed pierwszym użytkowaniem należy wyprać nakładkę.
- Wszystkie materiały opakowaniowe (np. folia, pudełka, plakaty, plastikowe końcówki) powinny być przed użyciem usunięte, aby nie pozostawały w zasięgu dzieci, gdyż mogłyby stać się niebezpieczną zabawką.

### PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA

- Nie stosować u osób, u których występuje nadwrażliwość na jakikolwiek składnik.
- Nie stosować w przypadku wystąpienia podrażnień, zmian skórnych lub innych objawów alergicznych, a także u osób mających uszkodzoną skórę, otwarte, niezabezpieczone opatrunkiem rany lub owrzodzenia.
- Nie stosować wyrobu niezabezpieczonego bawełnianym prześcieradłem.
- Nie stosować w bezpośrednim kontakcie z ciałem użytkownika.

### OSTRZEŻENIA

- Nakładka przeznaczona jest do stosowania w łóżeczku dziecięcym, o wymiarze wewnętrznym nie większym niż 30 mm, od rozmiaru materaca (dł. x szer.).
- Nie kłaść nakładki obok kominka, i/lub innych urządzeń osiągających wysoką temperaturę, np. kominki/piecyki ciepłe, gazowe, kaloryfery, grzejniki, itp., a także w pobliżu otwartego źródła ognia aby uniknąć ryzyka pożaru.
- Nie używać nakładki, jeśli jest uszkodzona, zepsuta lub rozdarta.

## KONSERWACJA

- Nakładkę należy poddawać okresowej procedurze prania (co najmniej jedno pranie, co 8 tygodni) lub w miarę potrzeby częściej, przy założeniu, że będzie stosowana zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji.
- Wyrób prać w pralce w temperaturze 40°C (proces normalny, wirowanie max. 1000 obr./min.) oraz suszyć w stanie rozłożonym na płasko, z daleka od działania promieni słonecznych i źródeł ciepła.
- Nie prać z wyrobami innego typu. Suszyć bez użycia źródła ciepła (np. kaloryfera, grzejnika lub suszarki do włosów). Nie suszyć w suszarce automatycznej. Przed suszeniem nakładkę należy zawsze poddać delikatnemu rozciąganiu, aby ułatwić jej ponowne założenie na materac. W tym celu należy starannie rozciągnąć lekko wilgotną nakładkę ze wszystkich stron (za wszystkie 4 rogi), w taki sposób, aby przed wyschnięciem powróciła do swoich pierwotnych rozmiarów. Wyrób prasować na prawej stronie.
- Prać w pralce o ładowności od 5 do 7 kg.

Parametry procesu konserwacji wyrobu:



UWAGA: Nie prasować lewej (wewnętrznej) strony nakładki.

## SKŁAD

33% przędza bambusowa; 67% poliester; Powłoka hydrofobowa: Ruco®-Dry Eco Plus / 100% poliester / 100% polipropylen / Guma: 50% poliester; 50% nici lateksowe.

## PRZECHOWYWANIE

- Wyrób transportować w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczającym przed zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym i zamoczeniem.
- Wyrób przechowywać i użytkować w temperaturze od 15°C do 35°C, w suchym, pozbawionym wilgoci i nadmiernego kurzu pomieszczeniu, z daleka od działania promieni słonecznych oraz z daleka od ognia oraz innych źródeł ciepła.

## WAŻNE

W razie wystąpienia każdego poważnego incydentu związanego z wyrobem, należy niezwłocznie poinformować producenta o tym zdarzeniu pisemnie na adres: Materacyk Baer Jacek, Czarnecki Damian Spółka Jawna, ul. Grunwaldzka 14, 62-020 Swarzędz, Polska; elektronicznie na adres e-mail: [biuro@materacyk.pl](mailto:biuro@materacyk.pl) lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 501 218 009 oraz właściwy organ państwa członkowskiego, na którego terytorium miał miejsce incydent.

## WYJAŚNIENIE SYMBOLI

Wyjaśnienie symboli stosowanych na etykiecie/etykietach wyrobu:

	Oznakowanie CE (potwierdzenie zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745)		Producent		Wyrób medyczny		Zajrzyj do instrukcji używania
	Numer katalogowy		Trzymać z dala od światła słonecznego		Chronić przed wilgocią		Numer serii
	Zawartość lub obecność naturalnej gumy lateksowej						

Wyjaśnienie symboli oznaczających proces konserwacji wyrobu:

	Maksymalna temperatura prania 40°C, proces normalny		Nie stosować bielenia		Nie suszyć w suszarce bębnowej
	Nie czyścić chemicznie		Prasowanie w maksymalnej temperaturze dolnej płyty 110°C. Prasowanie z zastosowaniem pary może powodować nieodwracalne uszkodzenia.		



**Materacyk Baer Jacek, Czarnecki Damian Spółka Jawna**  
ul. Grunwaldzka 14, 62-020 Swarzędz, Polska  
tel.: + 48 61 652 68 29 | [biuro@materacyk.pl](mailto:biuro@materacyk.pl)  
[www.materacyk.pl](http://www.materacyk.pl)



MDN.2301-0/REV.0/02.2024