



Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu, należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Wyrób należy użytkować zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji. W przypadku wątpliwości lub uzyskania dodatkowych informacji należy skonsultować się z lekarzem lub fizjoterapeutą.

REF **FP1**

Instrukcja użytkowania

Poduszka relaksacyjna

Przewidziane zastosowanie wyrobu:

Z uwagi na swoją budowę (kształt i wypełnienie) poduszka znalazła zastosowanie we właściwym pozycjonowaniu kobiet będących w ciąży. Wyrób zalecany jest do stosowania pod głowę i w odcinku szyjnym kręgosłupa, także podczas spania lub leżenia w pozycji na plecach oraz na boku. Poduszka jest zalecana przez ginekologów-położników oraz położne.

U kobiet ciężarnych wyrób można stosować w następujących schorzeniach¹⁾:

- Bóle karku.
- Ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej.
- Ból kręgosłupa piersiowego.
- Choroby korzeni nerwów rdzeniowych (Zespoły korzonkowe).
- Obrzęki ciążowe kończyn dolnych.
- Obrzęki kończyn dolnych inne, nieokreślone.
- Niewydolność żylna kończyn dolnych (przewlekła) (obwodowa).

Dzięki dodatkowym sznurowadłom, za pomocą poduszki można również bezpiecznie i prawidłowo ułożyć małe dziecko. Dlatego też wyrób można zastosować w przypadku²⁾:

- Trudności w karmieniu i nieprawidłowym karmieniu.


¹⁾ Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, ICD-10; odpowiednio: M54.2, M54.5, M54.6, M54.1, O12.0, R60.9, I87.2.

²⁾ Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, ICD-10; odpowiednio: R63.3.

Opis wyrobu:

Poduszka relaksacyjna (Model: FP1) to poduszka wykonana z trzech warstw:

- 1.** Niezależnego pokrowca wykonanego z dzianiny bawełnianej (100% bawełna).
- 2.** Wsadu wykonanego z tkaniny poliestrowej (100% poliester).
- 3.** Silikonowanego włókna kulkowego (100% poliester).

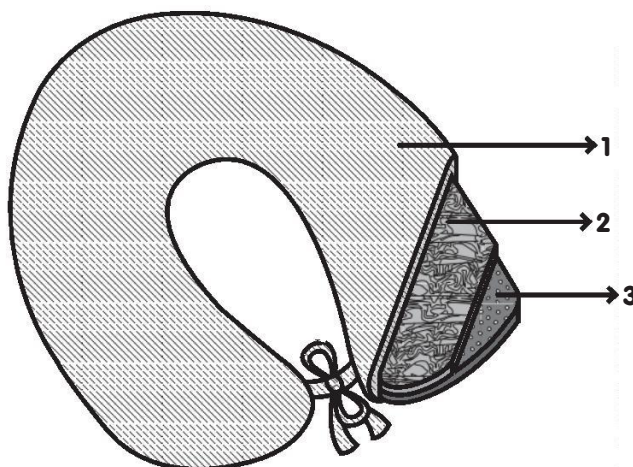

Właściwości pokrowca:

Poduszka relaksacyjna (Model: FP1) została wyposażona w pokrowiec z dzianiny bawełnianej (100% bawełna), który można bardzo łatwo zdjąć i założyć. Wyrób przystosowany jest do prania w pralce w temperaturze 40°C, wirowania i suszenia w suszarkach bębnowych.



Sposób użytkowania:

- Wyrób należy stosować zgodnie z przewidzianym zastosowaniem oraz ze wskazówkami i zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji.
- Wyrób jest nieinwazyjnym wyrobem medycznym, przeznaczonym do wielokrotnego użytkowania przez jednego użytkownika.
- Poduszkę można stosować pod głowę i w odcinku szyjnym kręgosłupa, a także jako wsparcie pleców oraz jako podparcie brzucha (jeden koniec ułożyć pod głowę, dłuższą część poduszki włożyć pod brzuch, natomiast drugi koniec umieścić między kolanami), podczas snu i wypoczynku.
- Wyrób przeznaczony jest do nieprzerwanego stosowania nie dłużej niż 12 godzin. W przypadku konieczności dłuższego użytkowania należy przewietrzyć wyrób.
- Przed pierwszym zastosowaniem wyrobu należy przeprowadzić procedurę prania wyrobu zgodnie z parametrami procesu konserwacji podanymi na wszywce.
- Nie można używać wyrobu zawilgoconego i/lub przemoczonego. W przypadku zamoczenia lub zabrudzenia pokrowca należy niezwłocznie przeprowadzić standardową procedurę prania.
- Nie dopuszczać do deformacji wyrobu poprzez jego zginanie, łamanie, rolowanie lub jakiegokolwiek inne działanie, które może doprowadzić do zmiany kształtu wyrobu. Należy codziennie strzepnąć poduszkę, aby zapobiec zbrylaniu się jej wypełnienia.
- Nie można przenosić poduszki wraz z użytkownikiem.
- W przypadku uszkodzenia, deformacji wyrobu lub stwierdzenia niemożliwych do usunięcia zabrudzeń, należy wymienić wyrób lub jego zabrudzony komponent na nowy.
- Poduszka przeznaczona jest do stosowania przez jedną osobę w warunkach domowych. Z powodów zdrowotnych i epidemiologicznych poduszka nie może być ponownie lub jednocześnie używana przez inne osoby. W razie zaistnienia konieczności użycia przez inne osoby, przed ponownym użyciem należy obowiązkowo wyrób poddać procesowi prania.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych związanych z użytkowaniem wyrobu należy skonsultować się z lekarzem.
- Wszystkie materiały opakowaniowe (np. folia, pudełka, plakaty, plastikowe końcówki) powinny być przed użyciem usunięte, aby nie pozostawały w zasięgu dzieci, gdyż mogłyby stać się niebezpieczną zabawką.

Przeciwwskazania do stosowania:

- Nie stosować wyrobu w przypadku wystąpienia podrażnień, zmian skórnych lub innych objawów alergicznych, a także u osób mających uszkodzoną skórę, otwarte, niezabezpieczone opatrunkiem rany lub owrzodzenia.
- Nie można użytkować wyrobu u osób, u których występuje uczulenie na jakikolwiek składnik wyrobu.


Przechowywanie i konserwacja:

- Wyrób należy transportować w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczającym przed zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym i zamoczeniem.
- Wyrób przechowywać i użytkować w suchym, pozbawionym wilgoci i nadmiernego kurzu pomieszczeniu, z daleka od działania promieni słonecznych oraz źródeł ciepła (kaloryferów, grzejników, piecyków ciepłych).
- Przed pierwszym zastosowaniem wyrobu należy przeprowadzić procedurę prania zgodnie z parametrami procesu konserwacji podanymi na wszywce. Każdorazowo po przeprowadzonym procesie prania należy mocno strzepnąć poduszkę. Zalecane jest stosowanie tzw. kulek piorących, aby zapobiec zbrylaniu się wypełnienia poduszki.
- Pokrowiec należy poddawać okresowej procedurze prania. Zalecane jest co najmniej jedno pranie co 6 tygodni, przy założeniu, że będzie stosowany zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji.
- Wyrób przystosowany jest do prania w pralce w temperaturze 40°C i wirowania w max. 1000 obr./min.
- Pod wpływem prowadzonych procedur prania, jak również zbyt długiego okresu używania dopuszczalne jest zbrylanie się wypełnienia wyrobu, a także zmechacenie lub zmiana barwy pokrowca (żółknięcie).
- Opakowanie jednostkowe zapewnia szczelne i próżniowe zapakowanie wyrobu. Dlatego przed pierwszym użytkowaniem należy wyprać oraz wywietrzyć wyrób i odczekać, co najmniej 24 godziny przed jego pierwszym użyciem. Umożliwi to pozbycie się naturalnych zapachów poszczególnych komponentów wyrobu.

Dostępne rozmiary:

Obwód: od 10 do 80 cm.

Długość: od 30 do 220 cm.

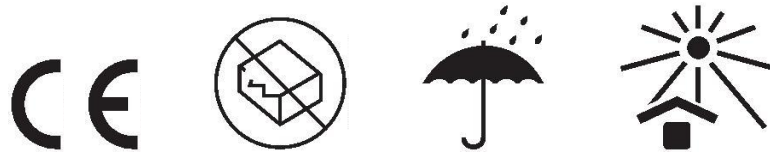

Numer i data wydania instrukcji: IU/FM/WM/REV.0/01.2018

www.materacyk.pl

Materacyk



Baer Jacek, Czarnecki Damian Spółka Jawna
ul. Grunwaldzka 14, 62-020 Swarzędz, Polska
tel.: + 48 61 652 68 29, fax: + 48 61 652 68 30